

# INHALÁTOR ULTRAZVUKOVÝ

návod k použití  
model: SY308



Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.

## Použití:



- 01) Vložte baterie nebo připojte USB kabel. Otáčením proti směru hodinových ručiček otevřete víko v horní části inhalátoru.
- 02) Naplňte inhalační kapalinu nebo čistou vodou. Víko uzavřete.
- 03) Nainstalujte masku nebo náustek.
- 04) Stiskněte tlačítko zapnutí pro spuštění inhalace. Opakovaným stiskem můžete nastavit 3 stupně výkonu. Po čtvrtém stisknutí dojde k vypnutí inhalátoru.

## Obsah balení:

- 1) Ultrazvukový inhalátor
- 2) inhalační maska pro dospělé
- 3) inhalační maska pro děti
- 4) náustek pro inhalaci ústy
- 5) napájecí USB kabel

## Technické údaje:

Napájení: 2 x 1,5V AA baterie nebo USB DC 5V/2A  
Kapacita nádržky: max. 8 ml  
Inhalační výkon: 0,2 ml/min (stupeň 1)  
Teplota inhalační kapaliny: max. 41°C

## Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-

vdějte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

## **Servis**

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## **Záruka se nevztahuje**

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
  - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
  - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
  - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
  - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
  - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.